



# Switch Driver 6

## Manuál

Smartbox

**Switch Driver 6 je aplikace, která umožňuje využít spínače k více činnostem. Můžete je nastavit tak, aby emulovaly stisk jakékoli klávesy nebo jakoukoliv akci myši, takže jsou pak kompatibilní s jakýmkoliv softwarem, který lze uzpůsobit pro ovládání spínači. Aplikaci nabízíme zdarma.**

Jednoduše nainstalujte software a připojte spínače pomocí adaptérů JoyCable nebo JoyBox, a můžete začít.

**Poznámka:** Pokud je připojení spínačů podporováno přímo softwarem, který chcete užít, např. Grid 3, nepotřebujete Switch Driver. Nahlédněte do manuálu, abyste zjistili, jak software pracuje se spínači.

## Instalace

Spusťte instalátor z CD nebo přímo z webových stránek [www.thinksmartbox.com/switch-driver-6](http://www.thinksmartbox.com/switch-driver-6), a postupujte podle jednoduchých instrukcí.

Když je Switch Driver spuštěn, najdete tuto ikonu na liště dole na obrazovce. Klikněte na ni a můžete upravovat nastavení.




## Začínáme

Stiskněte spínač a tato ikona se změní na okno Nastavení.

Pro začátek jsou zde dva příklady akcí spínačů:

- Mezerník a Enter
- Kliknutí myši

Můžete je upravit nebo si vytvořit vlastní s jakoukoliv akcí myši či klávesnice.

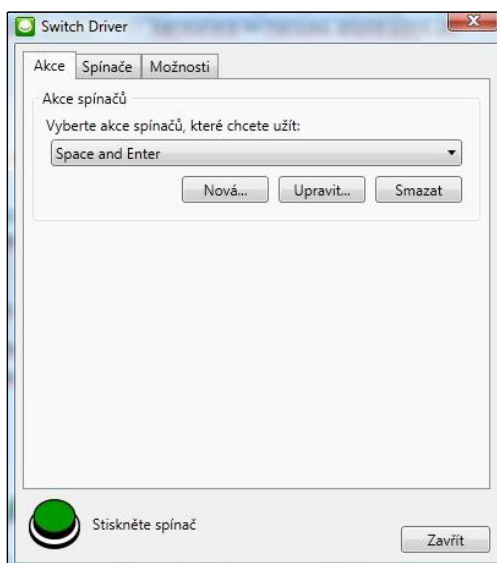


U každého spínače lze nastavit následující možnosti:

- Stisk klávesy na klávesnici (i s klávesou shift, alt nebo control)
- Stisk tlačítka myši nebo pohyb myši.

## Konfigurace

Ve štítku Spínače můžete konfigurovat Switch Driver tak, aby ignoroval neúmyslné stisky spínače.

Ve štítku Možnosti můžete změnit rychlost myši nebo vybrat, aby se Switch Driver spustil při startu Windows.

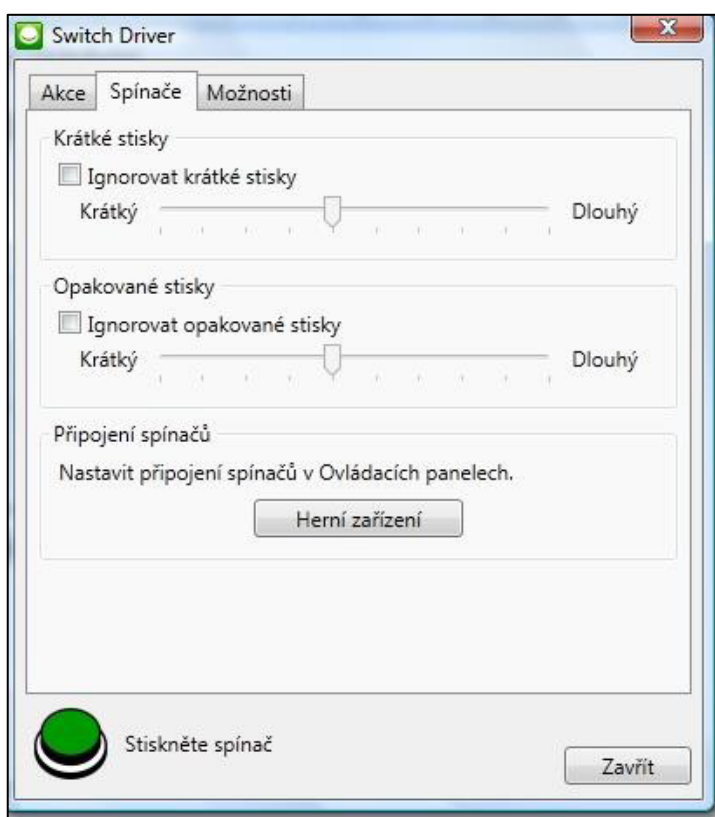



Smartbox