



Switch Driver 6

Handbuch

Smartbox

Switch Driver 6 ist eine kostenlose Anwendung, die es Ihnen ermöglicht Ihre Taster vielfältig einzusetzen. Sie können Ihre Taster so einrichten, dass Sie jede Tastaturtaste oder Maus simulieren können und somit mit nahezu jeder Software, die Taster - Eingaben unterstützt, kompatibel ist.

Einfach die Software installieren, die Taster mittels JoyCable oder JoyBox an den Computer anschließen, und Sie können beginnen!

Anmerkung: Falls Ihre Taster - Verbindung von der Software unterstützt wird, zum Beispiel The Grid 2, benötigen Sie Switch Driver nicht. Bitte schauen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Software nach.

Installation

Bitte starten Sie das Installationsprogramm von der DVD, oder von unserer Installations- Webseite www.thinksmartbox.com/switch-driver-6, und folgen Sie den einfachen Anweisungen.

Sobald Switch Driver installiert und gestartet wurde, befindet sich ein Symbol in der Taskleiste. Klicken Sie auf das Symbol um Ihre Einstellungen vorzunehmen.




Erste Schritte

Wenn Sie die Taster drücken werden Sie bemerken, dass sich das Symbol im Einstellungsfenster verändert. Für die ersten Schritte gibt es zwei Beispiele für Taster - Aktionen:

- Leertaste und Eingabetaste
- Maussteuerung

Diese können Sie bearbeiten oder Ihre eigenen Maus- oder Tastatur - Aktionen erstellen.

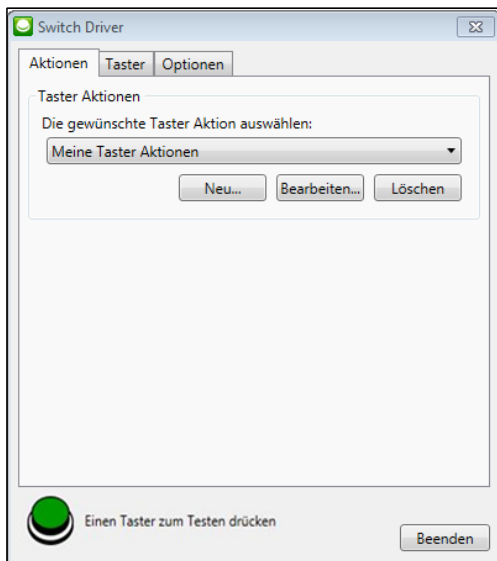


Jeder Taster kann mit folgenden Schritten eingestellt werden:

- Drücken Sie eine Taste auf der Tastatur (zusammen mit Shift, Alt oder Strg)
- Drücken Sie eine Taste der Maus oder bewegen Sie sie.

Benutzer Konfiguration

Sie können in der Registerkarte Taster den Switch Driver so einstellen, dass unbeabsichtigtes Drücken ignoriert wird.

In der Registerkarte Optionen, können Sie die Mausgeschwindigkeit oder den automatischen Start mit Windows einstellen.

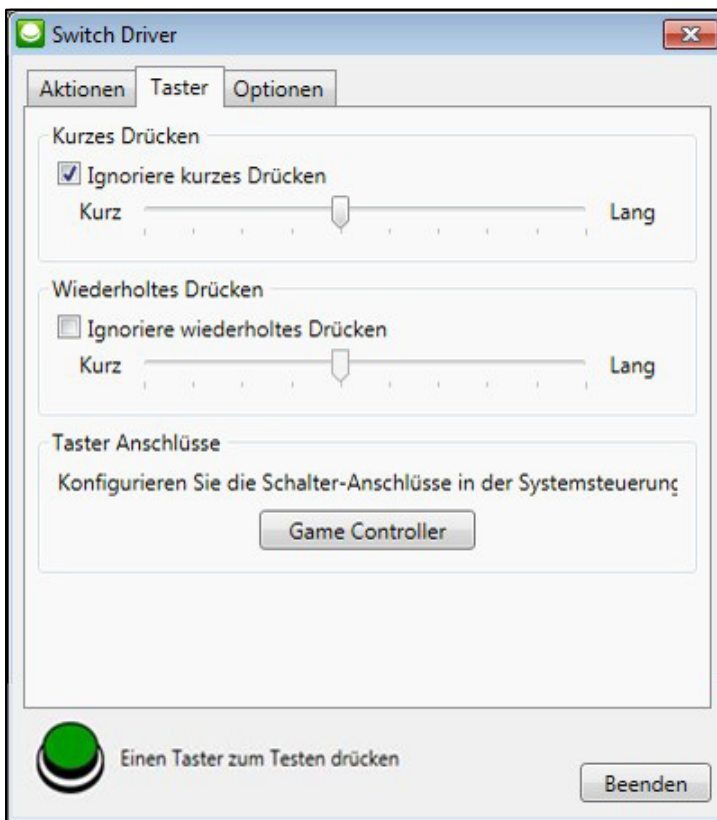



Smartbox