



# Dwell Clicker 2

## Manual

Smartbox

# Innhold

Om Dwell Clicker 2	2
Hvordan installere Dwell Clicker 2	2
Velkommen til Dwell Clicker 2	3
Dwell klikking	4
Visuelt Dwell display	5
Assisterte klikk	6
Høyre klikk og andre muligheter	7
Låse klikkfunksjon	8
Innstillinger	9
Målområde	10
Dvele Tid	10
Posisjon	11
Automatisk oppstart av Dwell Clicker	11
Lisens	11
Kjøpe Dwell Clicker 2	12
Avslutte Dwell Clicker 2	13

## Om Dwell Clicker 2

Dwell Clicker 2 er en Windows applikasjon som lar brukere benytte seg av musepekeren uten å måtte trykke på knapper. Dwell Clicker 2 er ideelt for brukere som benytter seg av alternativ betjening som f.eks. hodepeker eller joystick.

## Hvordan installere Dwell Clicker 2

1. Last ned Dwell Clicker 2 fra Smartbox sine hjemmesider:  
**[www.thinksmartbox.com/dwell-clicker](http://www.thinksmartbox.com/dwell-clicker)**
2. Installer Dwell Clicker 2 ved å dobbeltklikke på den nedlastede installasjonsfilen. Avhengig av hvordan datamaskinen din er konfigurert vil Dwell Clicker laste ned og installere annen nødvendig software.
3. For å kjøre Dwell Clicker 2 dobbeltklikker du på snarveien som er lagt inn på skrivebordsbakgrunnen din, eller ikonet i Start Menyen.

Dwell Clicker 2 krever:

- Windows XP med Service Pack 3
- Windows Vista med Service Pack 2
- Windows 7 eller senere versjoner

Visse funksjoner krever Windows Vista med Service Pack 2 eller senere versjoner.

## Velkommen til Dwell Clicker 2

Når du starter Dwell Clicker 2 for første gang vil du få opp verktøylinjen.



Du vil bli informert om at 30-dagers prøveperiode har begynt. Under prøveperioden vil du ha tilgang til alle funksjonene i Dwell Clicker 2

Når prøveperioden utgår, og dersom du ikke kjøper Dwell Clicker 2 vil du fortsatt kunne benytte deg av Dwell Clicker 2, men en del funksjoner vil ikke være tilgjengelige.

## Dwell Clicking

Dwell Clicker 2 lar deg benytte deg av musepekere eller andre betjeningsalternativer uten å måtte klikke. Med Dwell klikker du på følgende måter:

1. Plasser pekeren der du ønsker å foreta et klikk.
2. La pekeren hvile på skjermen der du ønsker å foreta et klikk. Lengden på tiden det vil ta før klikket aktiveres er justerbart- se Dvele Tid.
3. Etter en viss dveletid vil Dwell 2 Clicker foreta et klikk.
4. Du kan foreta forskjellige typer klikk (f.eks. høyreklikk, venstreklikk etc.) ved å velge fra verktøylinjen hva slags klikk du ønsker å foreta deg.

Dersom du beveger pekeren vekk fra området pekeren dveler i, vil klikket bli kansellert. Størrelsen på dveleområdet er justerbart- se Målområde.

# Visuelt dwell display

*Merk: denne funksjonen er ikke tilgjengelig i gratis versjonen.*

Underveis i dwelefunksjonen, vil dweletiden indikeres ved en sirkel, jo mer fullstendig denne sirkelen blir jo mindre er det igjen av dweletiden. Denne sirkelen vil også vise om det er foretatt et assistert klikk, altså om pekeren er blitt flyttet automatisk til der den nå befinner seg. Se Assistert klikking for mer info.

Du kan se når Dwell Clicker 2 er i ferd med å foreta et klikk:

1. Når du hviler pekeren på skjermen vil du kunne se en lyseblå sirkel. Hvis du nå foretar små justeringer vil sirkelen følge pekeren, slik at du kan foreta nøyaktige klikk. Hvis du foretar store justeringer med pekeren vil klikket bli kansellert og sirkelen vil forsvinne.



2. Når sirkelen blir mørkeblå er dette for å indikere at klikkposisjonen er låst. Hvis du nå foretar små justeringer vil ikke sirkelen bevege seg. Om du derimot gjør store justeringer vil klikket bli kansellert og sirkelen vil forsvinne.



3. Når sirkelen er sluttet vil Dwell Clicker gjøre et klikk der du har satt pekeren. Klikket vil være sentrert i midten av sirkelen.

## Assisterte klikk

*Merk: denne funksjonen er ikke tilgjengelig i gratis versjonen.*

Assisterte klikk er en funksjon som gjør det enklere å klikke på ikoner, meny alternativer og andre linker på skjermen.

Dwell Clicker vil automatisk merke felt på skjermen som kan klikkes på, og vil da «hoppe» til det alternative som er nærmest pekeren. DVS. at du trenger ikke flytte pekeren hele veien.

## Høyreklikk og andre muligheter

Du kan endre hvilken type klikk du ønsker å foreta deg ved å velge fra verktøylinjen.



**Hvile**

Dwell Clicker vil ikke foreta et klikk når du hviler pekeren. Velg en annen type klikk for å avslutte hvilemodus.



**Venstre trykk**

Dwell Clicker vil foreta et venstreklikk.



**Høyre trykk**

Dwell Clicker vil foreta et høyreklikk.



**Dobbelt trykk**

Dwell Clicker vil foreta et dobbeltklikk.



**Dra**

Dwell Clicker vil holde nede venstreknappen. Den første dveleperioden vil starte dra funksjonen, den neste dveleperioden vil avslutte dra-funksjonen.



**Skjermtastatur**

Henter frem Windows skjermtastatur.



**Innstillinger**

Viser Dwell Clicker innstillinger.



## Låse klikkfunksjon

*Merk: denne funksjonen er ikke tilgjengelig i gratis versjonen.*

Etter et høyreklikk, dobbeltklikk, eller dra-klikk, vil klikktypen automatisk gå tilbake til standard venstreklikk.

Dersom du ønsker å låse klikkfunksjonen til en spesifikk klikktype kan du gjøre dette.

For å låse klikkfunksjonen til en bestemt type klikk, velg den klikkfunksjonen du ønsker å låse klikket i- to ganger.



**Ikke valgt**

Denne klikktypen er ikke valgt.



**Valgt**

Dwell Clicker vil foreta denne klikktypen en gang, og så gå tilbake til venstreklikk.



**Låst**

Dwell Clicker vil f.eks. høyreklikke helt til bruker velger en annen klikkfunksjon.

# Innstillinger

For å få tilgang til innstillinger trykker du på Dwell Clicker 2 innstillingsknappen.



Denne knappen åpner innstillinger:

Dwell Clicker Innstillinger 2.0.1.0

Størrelse

Dveletid

2 sekunder

Lyd

Lyd er på

Position

Endre posisjon

Start Dwell Clicker automatisk

Skrivebord og brukerkontoer

Logg inn

Lisens

Dette er en prøveversjon av Dwell Clicker 2 med 18 dager igjen. En del funksjoner vil ikke være tilgjengelige når prøven avsluttes.

Kjøp Dwell Clicker

For mer fra Smartbox, besøk [www.thinksmartbox.com](http://www.thinksmartbox.com).

Avslutt Dwell Clicker

OK

Under følger en mer detaljert forklaring av innstillinger.

## **Målområde**

Målområde indikerer det område du kan justere pekeren innenfor uten å avbryte det aktuelle klikket. Selve målområde kan justeres enten ved å klikke på “-“ og “+” knappene, eller ved justere i statuslinjen.

## **Dveletid**

Ved å justere dveletiden angir du hvor lenge du ønsker at pekeren skal hvile på et ikon før klikket blir aktivert..

## **Lyd**

Her kan du velge å skru av eller på om klikk også skal gi tilbakemelding i form av lyd.

## Posisjon

Ved å klikke på «Endre Posisjon» endrer du hvor verktøylinjen skal befinne seg på skjermen.

## Automatisk oppstart av Dwell Clicker.

De to boksene det er mulig å huke av her avgjør hvordan Dwell Clicker 2 integrer seg med Windows oppsettet til brukeren.

Skrivebord og brukerkontoer. Huk av i denne boksen dersom du ønsker at Dwell Clicker 2 skal starte hver gang Windows starter. Dersom du har Windows Vista eller senere operativsystemer vil denne boksen også gi deg mulighet til å bruke Dwell Clicker til å svare på forespørsler/gi tillatelser til programmer i Windows.

Logg inn

Huk av denne boksen dersom du ønsker å kjøre Dwell Clicker fra Innloggingsmenyen til PC'en. Merk at dette kun er mulig i Windows Vista eller senere versjoner.

Endringer du gjør vedrørende disse valgene vil være gjeldende fra og med neste gang du starter PC'en din.

## Kjøp av Dwell Clicker 2

Du kan når som helst kjøpe full versjonen av Dwell Clicker 2. For å gjøre dette, trykk på Innstillingsknappen:

Når du er i innstillinger trykker du på "Buy Dwell Clicker"

knappen: deretter "Buy Now":

Dette vil åpne nettleseren din. Herfra vil du bli bedt om å fylle inn følgende: navn, email adresse, og land. På neste side vil du bli bedt om å fylle inn kredittkortinformasjon. Når dette er gjort vil Dwell Clicker 2 automatisk aktivere den nye lisensen din. Avhengig av systemkonfigurasjonen du benytter deg av vil du bli bedt om å svare «Ja/» etter følgende beskjed:


Kjøpet ditt var vellykket, produktet har blitt lisensiert på denne maskinen. Ta godt vare på lisenskoden du får oppgitt.

## For å avslutte Dwell Clicker 2

Det er to måter å avslutte Dwell Clicker 2 på:

1. Klikk på "x" som befinner seg i høyre hjørnet av Dwell Clicker 2 skjermen:
2. Klikk på «innstillinger» knappen, deretter klikk "Avslutt Dwell Clicker".



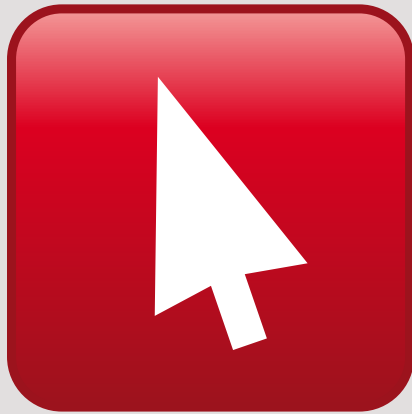

Smartbox