



Grid Pad

Démarrer

Grid Pad Go 10

# Prendre soin de votre Grid Pad

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez votre Grid Pad en toute sécurité sans objets durs posés ou appuyés contre l'écran.

## Nettoyage

La meilleure manière de nettoyer l'écran tactile est d'utiliser un chiffon en microfibre. Afin de minimiser le risque de transmission de bactéries entre les utilisateurs, il convient de nettoyer régulièrement la machine avec un détergent.

Vous pouvez ensuite essuyer avec une lingette à base d'alcool pour un nettoyage en profondeur.

La machine ne doit pas être immergée dans l'eau ou nettoyée avec un chiffon humide, des gels, de la cire ou tout produit de nettoyage abrasif.


## Protection

Le Grid Pad Go 10 a un indice de protection IP-65 contre les éclaboussures et les chutes, avec des ports étanchéisés et une enveloppe extérieure robuste. Le dispositif est construit pour supporter une chute de 1,2 m.

Le haut-parleur Bluetooth a un indice de protection IPX4 contre les éclaboussures et la pluie.


## Allumer votre Grid Pad

Pour allumer votre Grid Pad, appuyez sur le bouton d'alimentation en haut de l'appareil :

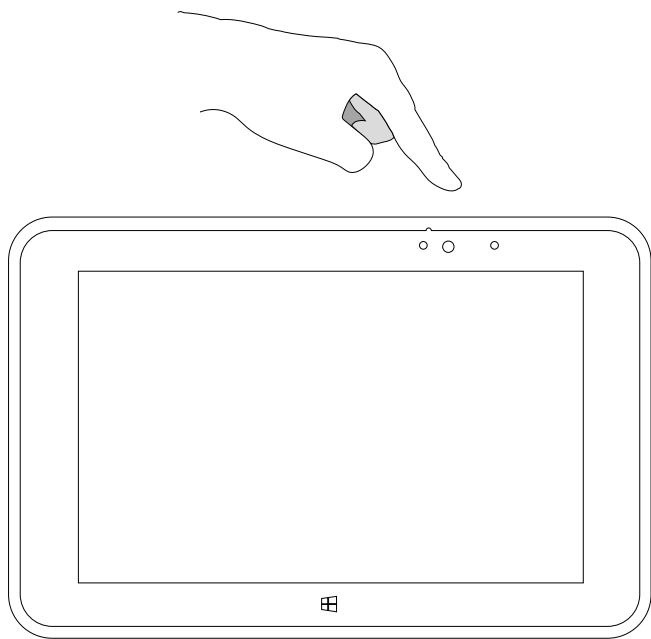


## Charger votre Grid Pad

Pour charger votre Grid Pad, branchez le câble de chargement dans une source d'alimentation et insérez dans le dispositif comme indiqué ci-dessous.

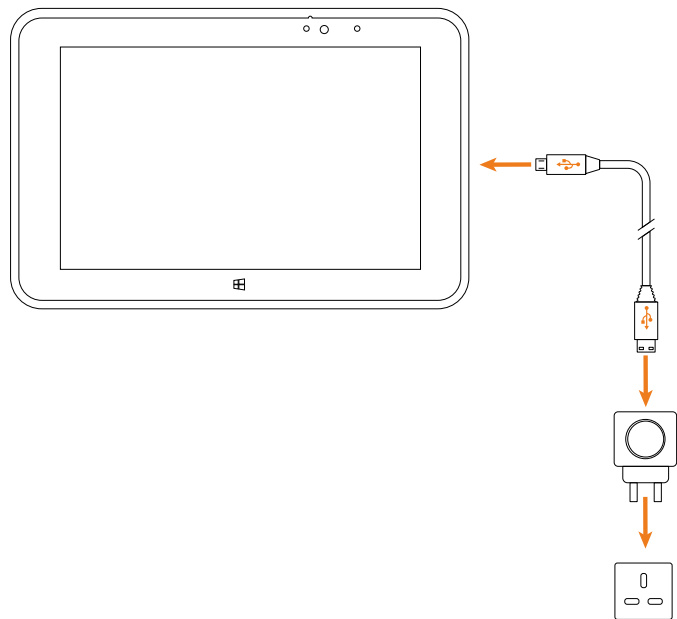

# Bluetooth speaker

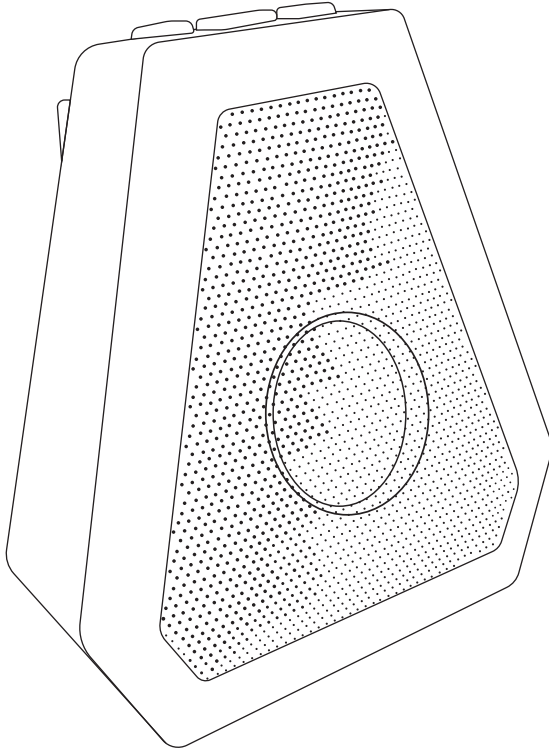

Votre Grid Pad est fourni avec un haut-parleur Bluetooth de haute qualité qui a été associé avec votre appareil pour fonctionner dès sa sortie de l'emballage.

Le haut-parleur est fourni avec un chargeur. La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation - nous recommandons de charger le haut-parleur à chaque fois que vous chargez le Grid Pad. Un voyant rouge s'allume lors du chargement du haut-parleur.

Lorsque le haut-parleur est allumé, une brève sonnerie retentit. Un voyant bleu clignote de manière intermittente lorsqu'il est connecté à votre Grid Pad.

# Associer le haut-parleur Bluetooth

Si vous avez besoin de réassocier votre haut-parleur Bluetooth avec votre Grid Pad, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton au centre en haut du haut-parleur, la LED à l'intérieur du haut-parleur clignotera.
2. Sur votre appareil, accédez à :  
**Paramètres PC > PC et périphériques > Bluetooth > Bluetooth activé**. Une recherche automatique sera lancée.  
Cliquez sur Boombot MINI.

Pour éteindre le haut-parleur, appuyez et maintenez enfoncé le bouton au centre, jusqu'à ce que le haut-parleur émette sa sonnerie de désactivation.

Le haut-parleur est chargé en connectant le port USB à n'importe quelle prise de 5 V ou peut être chargé à partir du port USB du Grid Pad.

## S'il n'y a pas de son

S'il n'y a pas de son, vérifiez dans les **Paramètres d'utilisateur Grid – Paramètres vocaux – Voix publique** que vous avez sélectionné voix et si le volume est réglé sur un niveau adapté.

S'il n'y a toujours pas de son, cliquez sur **Paramètres audio Windows** dans Paramètres voix publique et vérifiez si le son est mis en sourdine ou réglé trop bas.

# Spécification

<b>Processeur</b>	Intel® Atom™ CPU Z3795 1.60GHz
<b>Mémoire</b>	4 Go
<b>Disque dur</b>	64 Go
<b>Carte graphique</b>	Intel® HD Graphics
<b>Dimensions (mm)</b>	269 x 180 x 13
<b>Caméra</b>	2 MP avant et 8 MP arrière
<b>Écran</b>	10,1" Affichage HD 1920 x 1200
<b>Connectivité</b>	Wi-fi et Bluetooth
<b>Ports</b>	1 port USB 2.0, haut-parleur, Mini HDMI, emplacement pour carte Micro SD

# Garantie

Les périphériques Grid Pad sont couverts pendant 2 ans en vertu de la garantie standard.

## Réparations

N'essayez pas d'ouvrir votre Grid Pad, car il n'y a pas de pièces susceptibles d'être changées ou modifiées par l'utilisateur à l'intérieur. Si vous souhaitez discuter d'une réparation, veuillez contacter votre revendeur local.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [www.thinksmartbox.com](http://www.thinksmartbox.com).

## Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux.  
Ce Produit est soumis à la Directive 2002/96/CE du Parlement Européen et au Conseil de l'Union Européenne sur les les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.  
Veuillez utiliser vos infrastructures de collecte DEEE pour éliminer ce produit.



# Smartbox



## US Office

Smartbox Assistive Technology Inc  
2831 Leechburg Road  
Lower Burrell  
Westmoreland  
PA  
15068-2539

## UK Office

Smartbox Assistive Technology Ltd  
Smart House, 4a Court Road  
Malvern, WR14 3BL, UK

+44 (0) 1684 578868  
info@thinksmartbox.com