



Grid Pad

Komma igång

Grid Pad Go 8

# Ta hand om din Grid Pad

Förvara din Grid Pad på en säker plats och undvik att lägga saker på skärmen eller att luta skärmen mot någonting hårt när du inte använder den.

## Rengöring

Pekskärmen rengörs mest effektivt med en microfibertrasa. Torka apparaten regelbundet med rengöringsmedel på en lätt fuktad trasa för att undvika att bakterier överförs mellan olika användare.

För en noggrannare rengöring, använd en desinficerande våtservett.

Skölj aldrig enheten under vatten och använd inte en våt trasa för rengöring. Använd inga rengöringsprodukter som polerar eller slipar, vilket kan leda till repor på din Grid Pad.


## Tålighet

Din Grid Pad Go 8 har täta portar och ett slittåligt hölje och den är klassificerad mot stänk och droppar i enlighet med IP-65. Grid Pad är tillverkad att tåla ett fall på 1,2 m.

Bluetooth-högtalaren är skyddad mot vattenstänk och regn i enlighet med IPX4.


## Starta din Grid Pad

Starta din Grid Pad genom att hålla ned startknappen högst upp på apparaten.

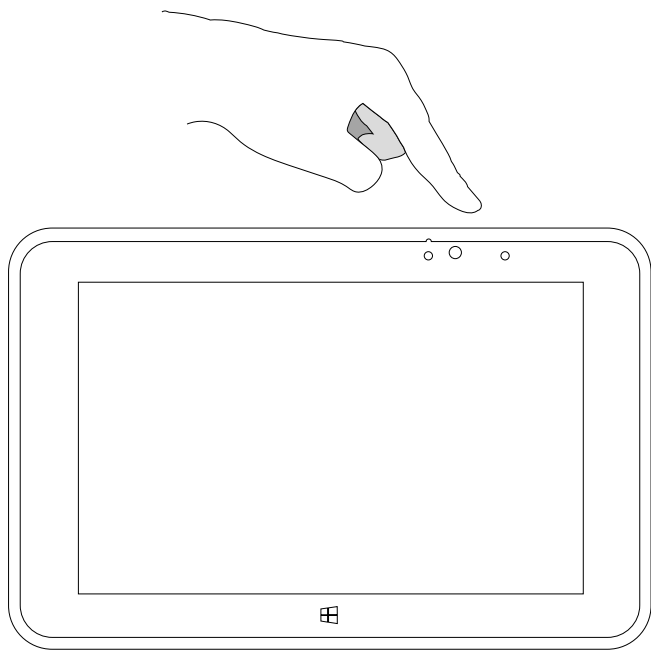


## Ladda din Grid Pad

Ladda batteriet i din Grid Pad genom att ansluta nätkabeln till ett eluttag och Grid Pad enligt bilden.

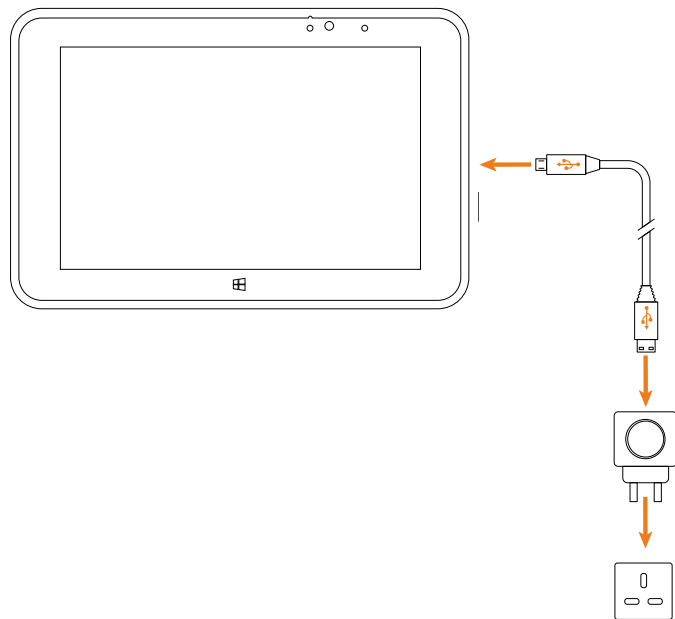

# Bluetooth speaker

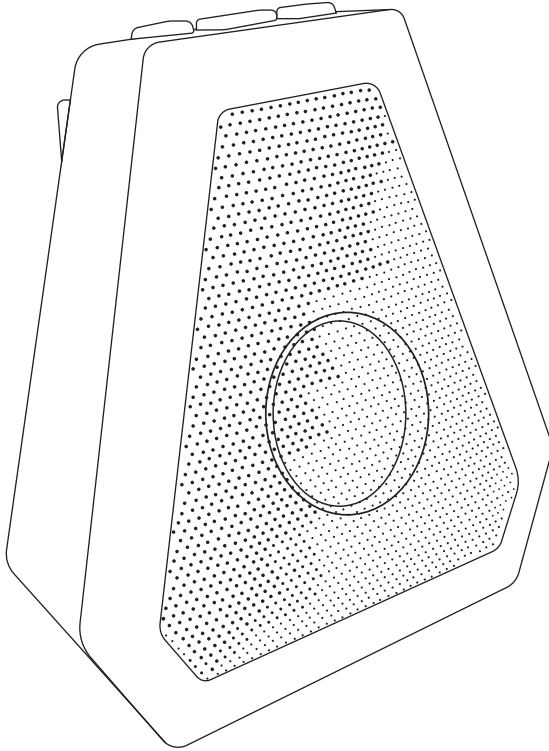

Grid Pad har en högkvalitativ Bluetooth-högtalare som redan är parkopplad med din enhet när du packar upp den.

En batteriladdare till högtalaren ingår. Batteritiden beror på hur enheten används, vi rekommenderar att du laddar högtalaren varje gång du laddar Grid Pad. En röd lampa visar när högtalaren håller på att laddas.

När högtalaren slås på spelas en kort melodi.  
När högtalaren är ansluten till din Grid Pad blinkar ett blått ljus.

# Parkoppla Bluetooth-högtalaren

Om du behöver återställa parkopplingen mellan Bluetooth-högtalaren och din Grid Pad följer du dessa steg:

1. Tryck på mittenknappen högst upp på högtalaren. LED-lampan inuti högtalaren blinkar nu.
2. På din enhet, gå till:  
**PC Settings > PC and Devices > Bluetooth > Bluetooth On.** Enheten söker nu automatiskt efter tillgängliga Bluetooth-enheter. Tryck på Boombot MINI.

Stäng av högtalaren genom att trycka och hålla ned mittenknappen tills högtalaren spelar melodin som bekräftar att den stängts ned.

Högtalaren laddas genom att ansluta USB-porten till en 5V-strömkälla eller genom att ansluta den till USB-porten på Grid Pad.

## Om inget ljud hörs

Om inget ljud hörs ur högtalaren kontrollera att du har valt en Voice under **Grid User Settings – Speech Settings – Public Voice**, och att volymen inte är för låg.

Om du fortfarande inte har något ljud, klicka på **Windows Audio Settings** under Public Voice-inställningar och kontrollera att ljudet inte är avstängt eller på för låg volym.

# Tekniska data

<b>Processor</b>	Intel® Atom™ CPU Z3795 1.60GHz
<b>Minne</b>	4GB
<b>Hårddiskutrymme</b>	64GB
<b>Grafikkort</b>	Intel® HD Graphics
<b>Mått (mm)</b>	228 x 150 x 13
<b>Kamera</b>	2 MP framsida och 8 MP baksida
<b>Skärm</b>	8.3" 1920 x 1200 HD-skärm
<b>Gränssnitt</b>	Wi-fi och Bluetooth
<b>Portar</b>	1x USB 2.0, högtalare ut, Mini HDMI, Micro SD-kortplats

# Garanti

Din Grid Pad har en garantitid på 2 år.

## Reparationer

Öppna inte Grid Pad och försök inte att reparera den på egen hand. För reparationer av Grid Pad kontakta din lokala återförsäljare.

Mer information hittar du på [www.thinksmartbox.com](http://www.thinksmartbox.com).

## Intyg om överrensstämmelse

Den här enheten tillmötesgår kraven från direktiv 93/42/EEC angående medicinsk utrustning.  
Den här produkten får inte slängas i hushållssoporna enligt Europaparlamentets WEEE-direktiv 2002/96/EC.  
Produkten ska lämnas in på lokal insamlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning.



# Smartbox



## US Office

Smartbox Assistive Technology Inc  
2831 Leechburg Road  
Lower Burrell  
Westmoreland  
PA  
15068-2539

## UK Office

Smartbox Assistive Technology Ltd  
Smart House, 4a Court Road  
Malvern, WR14 3BL, UK

+44 (0) 1684 578868  
info@thinksmartbox.com