

# Grid Pad

Toetsenraster  
installatiegids

Grid Pad Toetsenraster installatiegids  
(versie 1.0) Nederlands

Copyright 2018 Smartbox Assistive Technology  
[Thinksmartbox.com](http://Thinksmartbox.com) / [Thinksmartbox.nl](http://Thinksmartbox.nl)



## Toetsenraster installatiegids

Het Grid Pad toetsenraster maakt het mogelijk om uw aanraakscherm met meer precisie te gebruiken.

1.	Onderdelen	4
2.	Beginnen	5
3.	Uw toetsenraster plaatsen	6
4.	Grid 3 gebruiken met een toetsenraster	8
5.	Aanraakinstellingen	10
6.	Schoonmaken	11
7.	Productinformatie	12
8.	Veiligheid	13
9.	Notities	14



## Onderdelen

- Grid Pad toetsenraster
- Twee bevestigingsschroeven
- Schroevendraaier
- Installatiegids

# Beginnen

2

Het Grid Pad toetsenraster is ontworpen voor uw Grid Pad communicatiehulpmiddel en helpt u accurate selecties te maken op uw scherm. Elk toetsenraster is zo gesneden dat deze op een specifieke grid set aansluit.

Deze gids helpt u door de installatie van het toetsenraster en hoe deze te gebruiken met Grid 3.

De installatie van het toetsenraster bestaat uit 2 stappen.

Het is een goed idee om Grid 3 te configureren voordat u uw toetsenraster plaatst. Het kan namelijk zo zijn dat u door het toetsenraster niet meer bij bepaalde opties in het menu kunt, tenzij u een USB of Bluetooth muis aansluit op de Grid Pad.

## Benodigd gereedschap


Schroevendraaier (aanwezig)

Doekje (optioneel)

## 3


## Uw toetsenraster plaatsen

1. Schakel uw Grid Pad uit (**Start menu - Uitzetten**).
2. Plaats uw Grid Pad op een platte ondergrond met het scherm omhoog. U kunt een doekje gebruiken om eventuele krassen op het apparaat te voorkomen.
3. Haak het toetsenraster over de bovenste rand van uw Grid Pad zoals te zien is in de afbeelding.

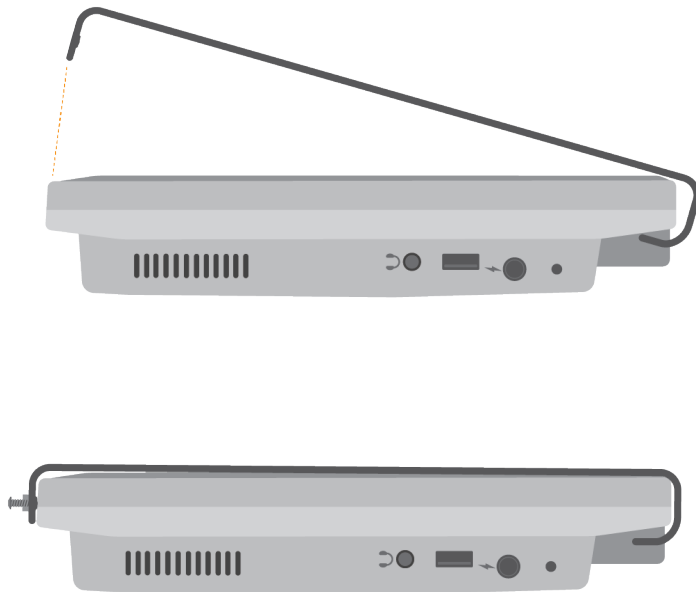


4. Breng de onderkant van het toetsenraster naar beneden en zorg ervoor dat de schroeven op één lijn liggen met de gaten in de onderkant van de Grid Pad.

5. Plaats de schroeven in de twee gaten aan de onderkant van het toetsenraster.

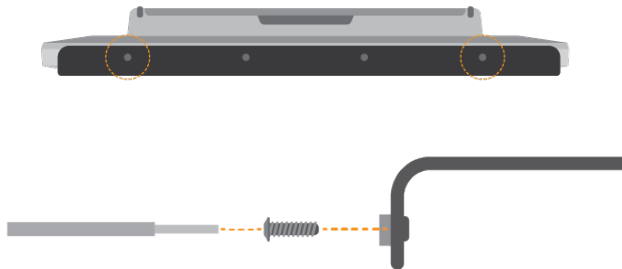

6. Draai de schroeven met de meegeleverde schroevendraaier aan totdat het toetsenraster stevig op zijn plaats zit. Draai de schroeven niet te hard aan.

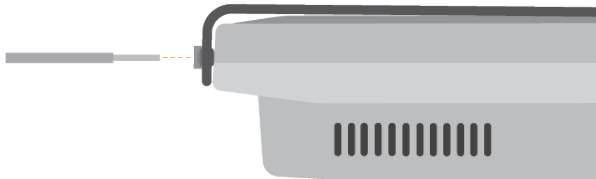

## Het toetsenraster verwijderen

Het Grid Pad toetsenraster is eenvoudig te verwijderen. Draai de schroeven los en til het toetsenraster vanaf de onderkant op. Haak het toetsenraster los.



## Grid 3 gebruiken met een toetsenraster

Het Grid Pad toetsenraster maakt het eenvoudiger om selecties te maken op het aanraakscherm van uw Grid Pad. Uw toetsenraster is ontworpen voor een specifieke grid set in Grid 3. U kunt Grid 3 het beste configureren voordat u het raster plaatst.

Wanneer u uw Grid Pad met een toetsenraster gebruikt, is het noodzakelijk om een USB of Bluetooth muis aan te sluiten om het menu en de Windows functies te kunnen bereiken.

### Het menu verbergen

Het bovenste menu van Grid 3 kan worden verborgen om een volledig scherm beleving te maken. Om het menu in Grid 3 te verbergen, ga naar **Instellingen - Computer**.

Onder het kopje **Opstarten** staat een keuzemenu met de functies:

- Toon menubalk
- Menubalk verbergen (Druk op F12 of raak de hoeken van het scherm aan om te tonen)
- Menubalk verbergen (Druk op F12 om te tonen)

Let op: u moet een Bluetooth of USB toetsenbord aansluiten om de F12 knop in te kunnen drukken.

Het is niet mogelijk om de **hoeken van het scherm** aan te raken wanneer een toetsenraster is geplaatst. Om deze functie te gebruiken moet u met een muis in de linkerbovenhoek en de rechteronderhoek van het scherm klikken om het menu weer te geven.



## Grid 3 instellen om automatisch op te starten


U kunt Grid 3 instellen om automatisch op te starten in **Instellingen - Computer**.

Zet **Open Grid 3 met Windows** aan.

U kunt nu de grid set kiezen waarmee Grid 3 opstart. Ga naar **Instellingen - uw profiel**. Selecteer in het keuzemenu onder **Opstarten** de grid set waar het toetsenraster voor ontworpen is.

### Startup

Choose where to start when this user is opened.

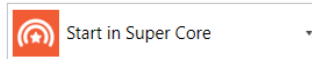

Wanneer u uw Grid Pad aan zet, zal deze nu opstarten in Grid 3 en automatisch de gekozen grid set openen/

# 5

## Aanraakinstellingen

Misschien wilt u instellen hoe uw aanraakscherm reageert. De Aanraakinstellingen in Grid 3 vindt u onder **Instellingen - Toegankelijkheid - Aanraken**.

Op dit scherm kunt u selecteren hoe de cellen activeren:

### Activeer het laatste onderdeel dat wordt aangeraakt

Als meerdere cellen tegelijk worden geselecteerd, zal het laatste onderdeel dat aangeraakt wordt geactiveerd worden.


### Activeer het eerste onderdeel dat wordt aangeraakt

Als meerdere cellen tegelijk worden geselecteerd, zal het eerste onderdeel dat aangeraakt werd geactiveerd worden.

### Aanraken en vasthouden om te activeren

Stel een bepaalde tijd in om vast te houden voor de cel geactiveerd wordt.

U kunt ook de markering en audioterugkoppeling op dit scherm instellen.

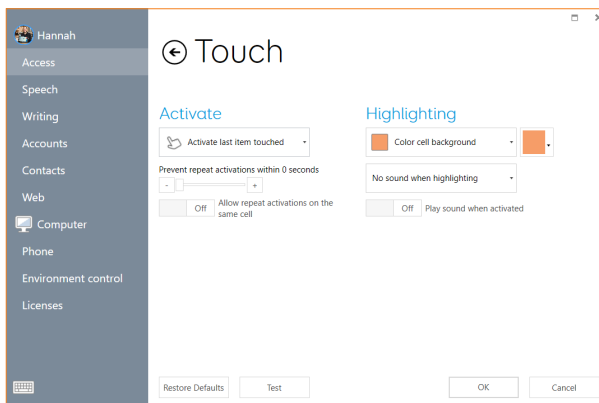

# Schoonmaken

6

U kunt het best het toetsenraster verwijderen voordat u uw Grid Pad schoonmaakt.

Het toetsenraster kan in warm water met zeep gewassen worden. U kunt ook een antibacterieel desinfectiemiddel gebruiken. Doe het toetsenraster niet in de vaatwasser en gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

Het scherm van uw Grid Pad kan schoongemaakt worden met een doekje met antibacteriële schermreiniger.

Zorg ervoor dat het toetsenraster droog is voordat u deze weer op de Grid Pad plaatst.



## Productinformatie

### **Productnaam**

Grid Pad toetsenraster

### **Omschrijving**

Een accessoire die ervoor zorgt dat een aanraakscherm gebruiker een grotere precisie en een betere tactiele ervaring heeft bij het gebruik van Grid 3.

# Veiligheid

8

Houdt alstublieft rekening met de volgende veiligheidswaarschuwingen om veilig gebruik te garanderen.

## Duurzaamheid

Uw toetsenraster is ontworpen om sterk en duurzaam te zijn, maar let op wanneer u het verplaatst terwijl het niet aan een apparaat bevestigd is.

Buig of draai het toetsenraster niet.

Het toetsenraster voorkomt geen waterschade bij de Grid Pad, dus pas op met vloeistoffen!

## Transport

Zorg ervoor dat uw toetsenraster tijdens het reizen op uw Grid Pad bevestigd blijft.

## Overige veiligheid

Wanneer het toetsenraster beschadigd is, kunnen er kleine onderdelen van de Grid Pad loslaten. Deze kunnen stikgevaar opleveren. Jonge kinderen en mensen met cognitieve beperkingen moeten het apparaat onder toezicht gebruiken.



# Notities

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Grid  Pad

Smartbox  
thinksmartbox.com

GP12-KEYGUARD-A