

Grid  Pad

Fingerguide installasjon

Gridpad Fingerguide installasjonsveiledning  
(Version 1.0) Norwegian

Copyright 2018 Smartbox Assistive Technology  
[thinksmartbox.com](http://thinksmartbox.com)



## Fingerguide installasjonsveiledning

Fingerguiden gjør det enklere å bruke touchskjermen mer presist.

1.	Innhold	4
2.	Kom i gang	5
3.	Installere fingerguide	6
4.	Bruke Grid 3 med fingerguide	8
5.	Berøringsinnstillinger	10
6.	Rengjøring	11
7.	Produktinformasjon	12
8.	Sikkerhet	13
9.	Notater	14



## Pakkens innhold

- Gridpad fingerguide
- To monteringskruser
- Skrutrekker
- Installasjonsveiledning

# Kom i gang

2

Gridpad fingerguide er tilpasset din Gridpad og hjelper deg med å treffe mer presist i ditt oppsett.

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du monterer og bruker den i Grid 3.

Montering av fingerguide har to hoveddeler.

Det er lurt å tilpasse Grid 3 før du monterer fingerguiden da den kan hindre deg i å finne menylinjen uten tilgang til eksternt tastatur og mus.

## Verktøy som kreves


Skrutrekker

Klut

## 3


## Installasjon av fingerguide

1. Slå av Gridpad'en (**Start meny - Avslutt**)
2. Plasser Gridpad'en på et flatt underlag med skjermen mot deg. Legg gjerne noe under for å beskytte Gridpad'en.
3. Fest fingerguiden over toppen av Gridpad'en som vist.

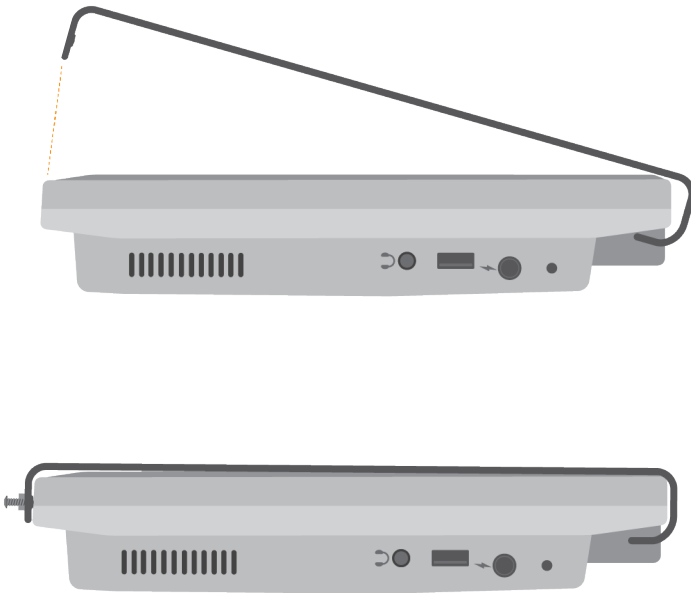


4. Trykk fingerguiden forsiktig inntil Gridpad'en og se at skruerullene passer til Gridpad'en i bunnen.

5. Sett inn skruene i de to hullene langs bunnen av Gridpad'en.

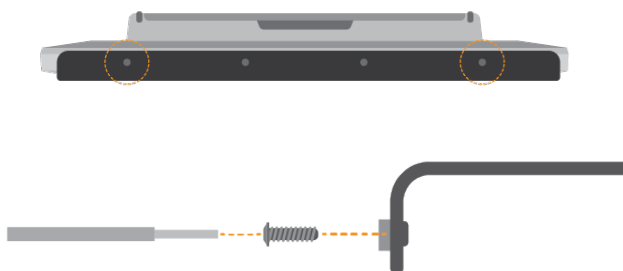

6. Stram skruene med den vedlagte skrutrekkeren inntil fingerguiden sitter godt fast. Ikke stram skruene for mye.

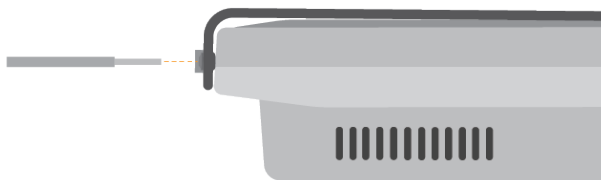

## Fjerne fingerguiden

Fingerguiden er enkel å fjerne. Skru ut skruene og løft fingerguiden opp fra bunnen. Hekt deretter av fingerguiden.

# 4

## Bruke Grid med fingerguide

Fingerguiden gjør det enklere å bruke touchskjermen mer presist. Fingerguiden er laget for spesifikke oppsett i Grid 3, som du må tilpasse før du monterer.

Når du bruker Gridpad med fingerguide må du koble til USB eller Blåtann-mus for å kunne få frem menyen og Windows.

### Skjule menyen

Menylinjen i Grid 3 kan skjules for å få fullskjerm-modus. For å skjule menylinjen i Grid 3 gå til **Innstillinger - datamaskin**.

Under **Oppstart**, velg fra rullemenyen:

- Vis menylinjen
- Skjul menylinjen (Trykk F12 eller trykk på skjermhjørner for å vise)
- Skjul menylinjen (Trykk F12 for å vise)

NB! Du trenger et Blåtann eller USB tastatur for å bruke F12.

Det er ikke mulig å bruke valget **Trykk på skjermhjørner for å vise** når fingerguiden er montert. For å bruke F12 må du trykke i øvre venstre og nedre høyre på skjermen med en mus for å vise menylinjen.

### Sett Grid 3 til å starte automatisk

Du kan sette Grid 3 til å starte automatisk ved å gå til **Innstillinger - Datamaskin**.




Sett **Start Grid 3** når windows starter til **PÅ**.

Du kan nå velge hvilket oppsett Grid 3 skal starte i. I rullgardinmenyen under **Oppstart**, velg Grid oppsettet som fingerguiden din er tilpasset til.

Når du starter Gridpad'en din vil den nå starte Grid 3 automatisk i det oppsettet du valgte.

## Oppstart

Velg hvor du skal begynne når denne brul åpnet.

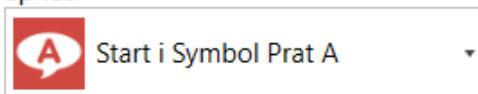

# 5

## Berøringsinnstillinger

Om du ønsker å endre hvordan berørings-skjermen din responderer, gå til **Innstillinger - Betjening - Berøring**.

I dette bildet kan velge hvordan felt aktiveres:

### Aktiver det siste elementet som berøres

Dersom flere felt er valgt samtidig vil det sist berørte felt aktiveres.


### Aktiver det første elementet som berøres

Dersom flere felt er valgt samtidig vil det første berørte felt aktiveres.

### Trykk og hold for å aktivere

Velg dveletid for et felt før det aktiveres.

Du kan også velge bakgrunnsfarge på felt og stille auditiv tilbakemelding i dette vinduet.

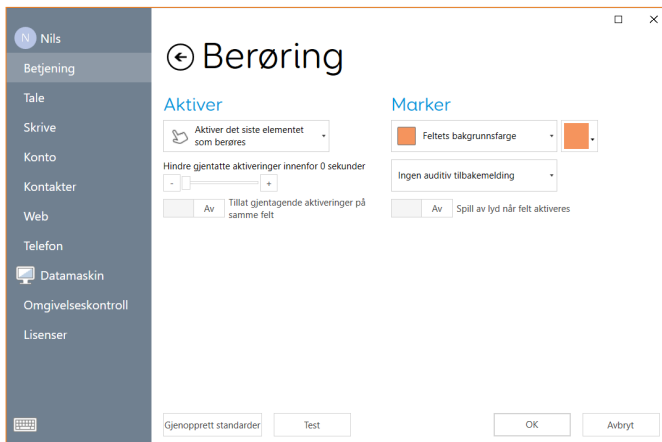

# Rengjøring

6

Det er lurt å fjerne fingerguiden før du rengjør Gridpad'en.

Fingerguiden kan vaskes i varmt såpevann. Du kan også bruke antibakteriell skjemrens. Ikke sett fingerguiden i oppvaskmaskin eller lignende.

Din Gridpad kan rengjøres med en antibakteriell skjermklut.

Se til at fingerguiden er tørr før den settes på Gridpad'en.



## Produktinformasjon

### **Produktnavn**

Gridpad fingerguide

### **Beskrivelse**

Et tilbehør som gir mer presis berøring på Gridpad'en.

# Sikkerhet

8

Vennligst følg disse sikkerhetsadvarslene for å bevare fingerguiden best mulig.

## Varighet

Fingerguiden er laget for å være holdbar, men vis hensyn om du flytter det rundt uten at det er montert på Gridpad'en.

Ikke bøy eller vri på fingerguiden.

Fingerguiden beskytter ikke Gridpad'en mot vannskader, så vis hensyn i nærheten av væske.

## Å transportere

Når du reiser kan fingerguiden være montert på Gridpad'en.

## Annen sikkerhetsinformasjon

Om fingerguiden blir skadet kan små biter falle av. Disse kan fremkalle kvelningsfare. Små barn og mennesker med kognitiv svikt bør bruke fingerguide og Gridpad under observasjon.





# Grid Pad

Smartbox  
thinksmartbox.com

GP12-KEYGUARD-A-NO