

Smartbox

Kapitel 2.3


Rasterseiten hinzufügen und verwalten

Häufig besteht der Bedarf, Rasterseiten hinzuzufügen oder umzuorganisieren, vor allem, wenn Inhalte hinzugefügt, entfernt oder anders verknüpft werden.

Eine neue Rasterseite erstellen

Gehen Sie in den Bearbeitungsmodus über die Menüleiste oder **F11**.

Wählen Sie oben links im Menü die blaue Registerkarte **Seitenset**.

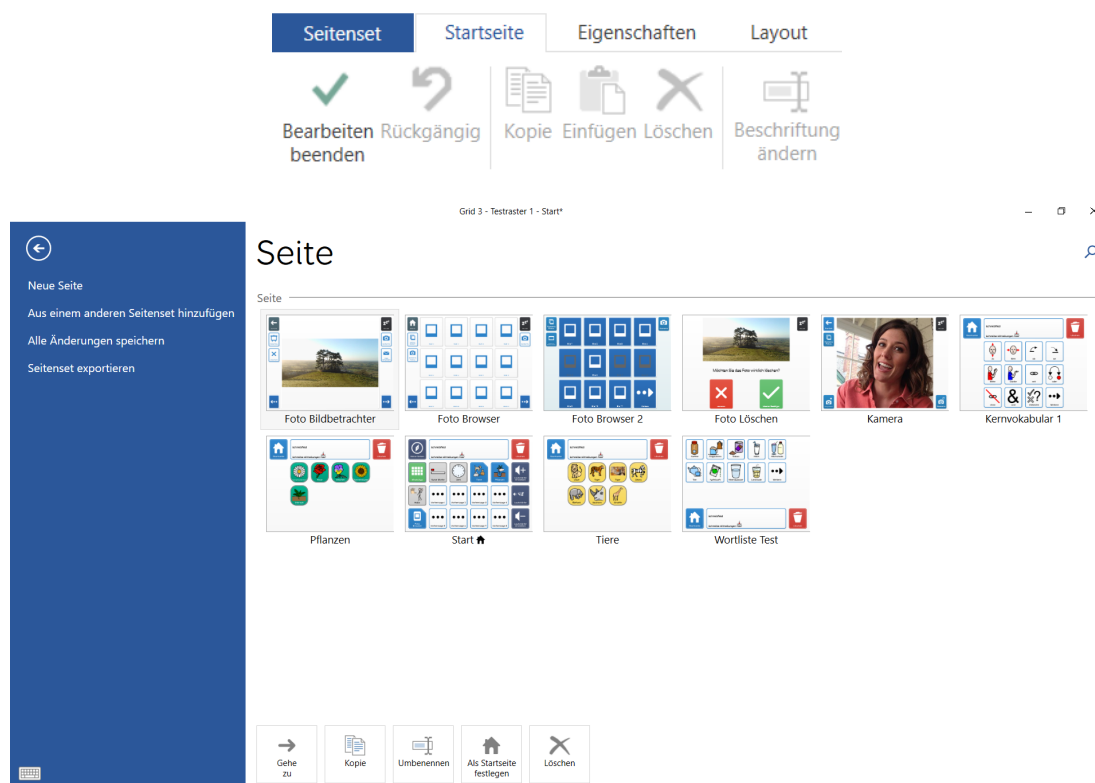

Klicken Sie dann im Menü links auf **Neue Seite**.




Legen Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen fest. Benennen Sie die Seite und klicken Sie **OK** zum Abspeichern.

Seiten aus einem anderen Seitenset hinzufügen

Dies ist eine gute Möglichkeit, um komplexe Inhalte und Funktionen nicht neu erstellen zu müssen, sondern aus einem anderen Seitenset zu übernehmen. Beispielsweise eine Music-Player-Seite in ein vokabelbasiertes Seitenset, damit der Nutzer seine Lieblingsmusik hören kann.

Wählen Sie im Bearbeitungsmodus die Registerkarte **Seitenset** und daraufhin links im Menu die Option **Aus einem anderen Seitenset hinzufügen**.

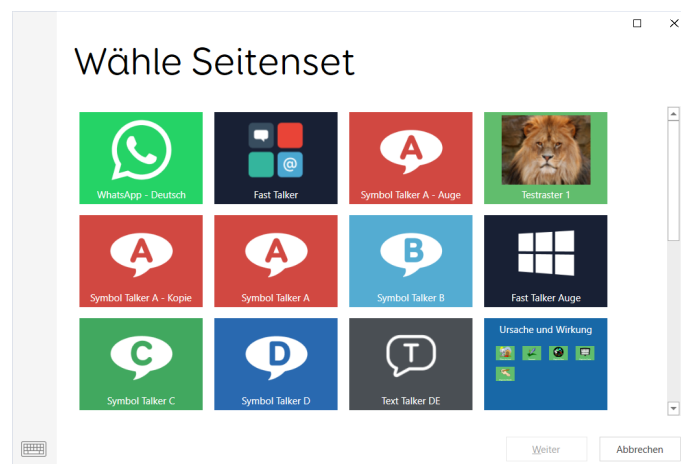

Es erscheint eine Liste mit allen Seitensets. Wählen Sie ein Seitenset aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Mit gedrückter **STRG**-Taste können mehrere Rasterseiten ausgewählt werden. Mit **Hinzufügen** wird der Vorgang abgeschlossen

Klicken Sie auf **Hinzufügen**.


Zumeist sind nach dem Einfügen weitere Bearbeitungsschritte erforderlich, z.B. die Anpassung an das Design und die Änderung von Verknüpfungen.

Alle Änderungen speichern

Hierdurch werden sämtliche vorgenommenen Bearbeitungsschritte gespeichert.

Seiten verwalten

Auf der Registerkarte **Seitenset** finden sich verschiedene Verwaltungswerkzeuge.

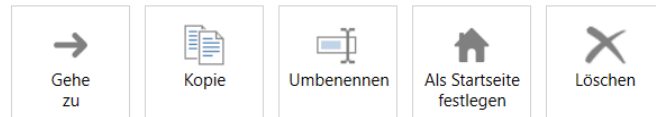

Gehe zu

Wählen Sie die Rasterseite, die geöffnet werden soll, aus und klicken Sie auf **Gehe zu**. Dadurch öffnet sich die Seite im Bearbeitungsmodus.

Kopie

Hierdurch entsteht eine Kopie einer vorhandenen Rasterseite. Benennen Sie die Kopie und speichern Sie sie über OK. Daraufhin öffnet sich die Seite im Bearbeitungsmodus.

Umbenennen

Wählen Sie eine Seite aus, die umbenannt werden soll. Klicken Sie auf **Umbenennen**, vergeben Sie einen Namen und bestätigen Sie mit **OK**.

Als Startseite festlegen

Die Startseite ist die Rasterseite, die beim Öffnen des Rastersets erscheint. Wählen Sie die entsprechende Seite aus und klicken Sie auf **Als Startseite festlegen**. Die Startseite trägt ein Haus-Symbol.

Löschen

Wählen Sie die zu entfernende Seite und dann **Löschen** aus. Vor dem Löschen erscheint zur Sicherheit ein Fenster, in dem Sie das Löschen mit **Ja** bestätigen müssen.

Zusätzlich erscheint eine Information über andere Seiten, die mit der zu löschenden Seite verknüpft sind.

Seitenset exportieren

Damit lässt sich ein Seitenset als Datei sichern - zur Erstellung einer Sicherheitskopie oder zur Übertragung auf ein anderes Gerät.